


| | | |
|--|---|------------------------------------|
|  | PROEXI COMERCIO, EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI . | Emissão: JAN/2022 |
| | FICHA TÉCNICA | |

Identificação do produto e Apresentação

Nome Técnico: **Tubo Endotraqueal sem cuff TAPPA**
 Nome Comercial: **Tubo Endotraqueal sem cuff TAPPA**
 N° de registro na ANVISA: **81194869001**
 Embalagem: **Unitária.**
 Proibido reprocessar
 Prazo de validade: **05 anos**
 Produto estéril por Óxido de Etileno.

Códigos do Fabricante:

| Referência | Diâmetro Interno |
|-----------------|------------------|
| ETT 3012 | 3.0 |
| ETT3512 | 3.5 |
| ETT4012 | 4.0 |
| ETT4512 | 4.5 |
| ETT5012 | 5.0 |
| ETT5512 | 5.5 |
| ETT6012 | 6.0 |
| ETT6512 | 6.5 |
| ETT7012 | 7.0 |


Fotos:



Descrição e Indicação:

O tubo endotraqueal sem balão é destinado a intubação nasal. O Tubo Endotraqueal sem cuff é introduzido na traqueia com o auxílio de um laringoscópio para realizar a ventilação mecânica invasiva. Uma faixa radiopaca é incorporada em toda a extensão do tubo e cada tubo é fornecido com um conector de 15 mm parcialmente inserido. O produto é invasivo com tempo de permanência até 30 dias (curto prazo).

Instruções de Uso:

| | | |
|--|---|------------------------------------|
|  | PROEXI COMERCIO, EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI . | Emissão: JAN/2022 |
| | FICHA TÉCNICA | |

- 1- Use lubrificante solúvel em água, caso necessário.
- 2- Escute o ar que passa ao redor do manguito para determinar se uma vedação efetiva foi realizada .
- 3- Verifique se a intubação está correta e as vias aéreas estão ajustadas conforme necessário
- 4- Prenda e conecte o tubo ao equipamento de ventilação.

Especificações Técnicas:

Composição cloreto de polivinil (PVC).

Componentes: Tubo de via aérea e conector de 15mm

Condições de Armazenamento:

O produto deve ser armazenado em ambiente de gás não corrosivo, fresco, seco , bem ventilado e limpo com umidade relativa do ar não superior a 80%.

Advertências:

- 1 -Usado por equipe médica clínica profissional
- 2 – O fabricante recomenda uso único
- 3 – Use imediatamente após desembalar
- 4 – Não use se a embalagem interna estiver danificada ou se o prazo de validade estiver expirado.

Importador/Distribuidor: Proexi Comércio , Exportação e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Eireli.

Rua: Conde de Porto Alegre , 57 , Rocha , 1° andar Cep : 20960-110

Tel: (21) 3860-3136 – sac@promedicaexportacao.com.br

Responsável Técnico: Areta Marcela Oliveira do Vale Costa COREN – RJ nº 264.411

Fabricante Responsável: Hangzhou Tappa Medical Technology Co , Ltd

Endereço: No . 225#, Chutian Road , Binjiang District , Hangzhou , China , 310051.

Tel – (+86) 571 8808 5616