



## Identificação do produto e Apresentação

Nome Técnico: Máscara Facial Almofadada

Nome Comercial: **Máscara Sure Seal**

Códigos do Fabricante:

Código	Tamanho	Cor do anel
1277	Neonato	Branco
1278	Infantil	Rosa
1279	Pediátrico	Amarelo
1280	Adulto Pequeno	Verde
1281	Adulto Médio	Vermelho
1282	Adulto Grande	Azul

Nº de registro na ANVISA: 10342600054

O fabricante recomenda o uso único.

Prazo de Validade: 05 anos

Embalagem: Unitária.


Produto pronto uso- Clinicamente Limpo.

## Foto



Branca neonato 1277

Rosa Infantil 1278

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Última revisão: Junho/2018
	FICHA TÉCNICA	

## Descrição e Indicação

Máscara facial almofadada de alta resistência conexões padrão de 22mm e 15mm, formato anatômico, constituída de cúpula flexível transparente, para visualização segura da face do paciente. Apresenta coxim inflável que permite selagem hermética por baixa pressão, e moldagem perfeita à face do paciente. Contém válvula de insuflação do coxim. Acompanha anel colorido para fixação.

## Instrução de Uso

1. Remova a máscara da embalagem;
2. Verifique o nível de insuflação do coxim da máscara:
  - Para ajuste da pressão, conecte uma seringa padrão na válvula de insuflação. Insufle ou desinsufle o coxim de acordo com a pressão desejada;
  - Inspecione possíveis vazamentos;
3. Conecte a máscara ao circuito ventilatório ou ao ressuscitador manual;
4. Certifique-se que as conexões estão seguras;
5. Mantenha a máscara conectada à face do paciente com a mão ou com um fixador cefálico durante o uso. O anel de fixação deve ser removido da máscara em caso de sua não utilização;
6. Em caso de suspeita de inadequado funcionamento da máscara, substitua-a imediatamente;
7. Descarte-a após o uso.

## Composição

“Concha” e coxim (almofada): PVC (polivinilcloride).

Conector: Policarbonato

Anel: Polietileno e corante.

Válvula de insuflação: PVC

Livre de Látex.

**Importador/Distribuidor:** CNPH – Comercial Nacional de Produtos Hospitalares

Rua Gama Cerqueira, 331 - CEP: 01539-010

Cambuci - São Paulo – SP

Tel: 011-3385-9339 – [sac@cnph.com.br](mailto:sac@cnph.com.br)

Responsável Técnico: Morgana Borges de Araújo – CRF-SP: 74338

**Fabricante:** TELEFLEX MEDICAL 2917, Weck Drive - Research Triangle Park, NC 27709 EUA