	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: 2015
	FICHA TÉCNICA	

Identificação do produto e Apresentação

Nome Técnico: Exercitador Respiratório de incentivo para inspiração profunda

Nome Comercial: **Voldyne**

Códigos do Fabricante:

Modelo	Código	Graduação Máxima	Graduação Mínima	Intervalos de Graduação
Voldyne [®] 5000	8884719009	5000 mL	250 mL	250 mL, com marcação numérica de 500 em 500 mL
Voldyne [®] 2500	8884719025	2500 mL		
Voldyne [®] Pediátrico	8884719017	2500 mL		

Nº de registro na ANVISA: 10342600040

O fabricante recomenda o uso único.

Prazo de Validade: Indeterminado

Embalagem: Unitária.

Foto



Descrição e Indicação

O Exercitador Respiratório - Hudson RCI foi desenvolvido cientificamente para auxiliar o paciente a desenvolver exercícios respiratórios prescritos pelo terapeuta. Este produto permite mensurar e observar a capacidade inspiratória do paciente.

O Exercitador Respiratório - Hudson RCI é indicado para exercitar a função respiratória em casos de prevenção e tratamentos de complicações pulmonares associadas a traumas torácicos e tratamento de atelectasia pré e pós-operatória.


O Exercitador Respiratório - Hudson RCI tem como objetivo reexpansão pulmonar, aumento da permeabilidade das vias aéreas e fortalecimento dos músculos respiratórios.

Quando utilizado de acordo com as instruções do terapeuta respiratório, ajuda na melhoria, desenvolvimento e manutenção da capacidade respiratória do paciente (ganho de força e resistência muscular respiratória).


Seguindo de maneira criteriosa as instruções do terapeuta respiratório e utilizando o Exercitador Respiratório - Hudson RCI, o paciente obterá os benefícios da manutenção de padrões respiratórios adequados, tendo desta forma maiores possibilidades de uma recuperação mais precoce.

Instruções de Uso


1. Remova o produto da embalagem.
2. Conecte a extremidade livre do tubo corrugado na parte frontal do Voldyne[®] ;

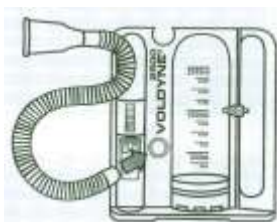

2. Deslize a peça marcadora do fluxo situada à direita da câmara principal para ajuste do volume prescrito pelo terapeuta;

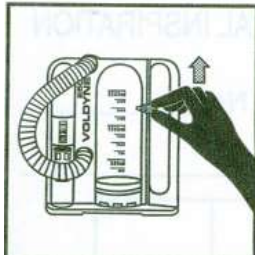


3. Segure e mantenha o produto em posição vertical. Expire normalmente. Então coloque o bucal entre os lábios e prenda-o firmemente.

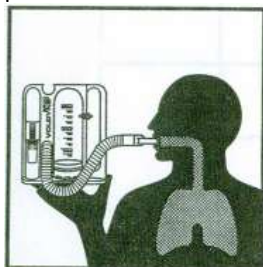

4. Inspire vagarosamente fazendo com que o pistão branco dentro da câmara suba até a marca desejada. Durante toda a inspiração, o pistão amarelo da câmara secundária deverá manter-se na marca “BEST”.

5. Continue inalando de maneira a manter o pistão no nível prescrito. Quando a inalação está completa, remova os lábios do bucal, segure a respiração conforme o prescrito e exale normalmente. O pistão branco deverá retornar até a base da câmara principal e outro exercício pode ser começado.

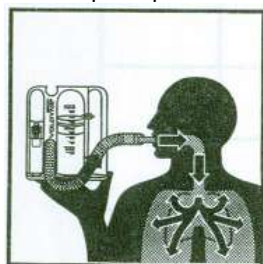

- A frequência de uso e volumes inspiratórios recomendados devem ser prescritos pelo terapeuta respiratório.
- Durante o descanso do paciente entre os exercícios, o bucal pode ser encaixado na parte superior do Exercitador Respiratório.

Nota: Após cada utilização, enxágue o bucal e seque-o. Coloque o produto dentro de uma embalagem plástica quando não estiver em uso.

Composição

Estireno, poliestireno e polipropileno. Produto sem látex.

Importador/Distribuidor: CNPH – Comercial Nacional de Produtos Hospitalares - Rua Gama Cerqueira, 331 - CEP: 01539-010

- Cambuci - São Paulo – SP - Tel: 011-3385-9339 – sac@cnph.com.br - Responsável Técnico: Morgana Borges de Araújo – CRF-SP: 74338.

Fabricante: TELEFLEX MEDICAL 2917, Weck Drive - Research Triangle Park, NC 27709