



COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES

Emissão:
set/2014**FICHA TÉCNICA****Identificação do produto e Apresentação**Nome Técnico: **Nebulizador**Nome Comercial: **Conjunto para nebulização Aquapak®**N° de registro na ANVISA: **10342600026**

Prazo de Validade: 4 anos

Foto e códigos

Adaptador para nebulizador 031-28	Frasco reservatório Aquapak® 004-00	Tubo corrugado 1418	Tenda Facial 1095
			

Descrição e Indicação

Nebulizador de grande volume usado em terapia respiratória, em cuidados intensivos e de longo período. Transforma líquido em aerossol (névoa) fornecendo umidificação ao trato respiratório, a fim de mobilizar e remover secreções. Utiliza frasco reservatório de água estéril (Aquapak®), um adaptador para nebulizador e um tubo corrugado de 1,80m. A interface é realizada através de uma tenda facial. Ótimo custo-benefício. Sistema estéril. Técnica asséptica. Sistema fechado. Auxílio ao controle de infecção (CCIH).

Composição

Solução: Água Estéril.

Adaptador para nebulizador: PVC

Tubo corrugado: PVC

Tenda Facial: PVC

Instruções de Uso

1. Enrosque o adaptador do nebulizador ao frasco reservatório de água estéril e aperte-o.
2. Segure o tubo de retorno por detrás da borda de punção e retire a tampa.
3. Introduza o pino no orifício de punção do frasco reservatório de água estéril e empurre-o até que as bordas toquem o frasco.
4. Conecte o tubo corrugado na extremidade de saída do adaptador do nebulizador
5. Gire o anel de retenção de ar no nebulizador até a concentração de oxigênio desejada.
6. Ajuste o botão na graduação desejada e verifique o fluxo de ar através do dispositivo.
7. O nebulizador está preparado para uso quando o líquido fluir através do tubo de retorno.

Importador/Distribuidor: CNPH – Comercial Nacional de Produtos Hospitalares - Rua Gama Cerqueira, 331 - CEP: 01539-010 - Cambuci - São Paulo – SP - Tel: 011-3385-9339 – sac@cnph.com.br.

Responsável Técnico: Morgana Borges de Araújo. CRF-SP: 74338

Fabricante: TELEFLEX MEDICAL 2917, Weck Drive - Research Triangle Park, NC 27709