	PROEXI COMERCIO, EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI .	Emissão: Abr/2021
	FICHA TÉCNICA	

Identificação do produto e Apresentação


Nome Técnico: **Fios e Fita Cirúrgicas**
 Nome Comercial: **Surgical Vessel Loop**
 N° de registro na ANVISA: **81194869007**
 Embalagem: **Unitária.**
 Proibido reprocessar
 Prazo de validade: **05 anos**
 Produto estéril por Óxido de Etileno.

Descrição e Indicação:


É um cordão estéril e não implantável destinado a ser usado em um procedimento cirúrgico , com a finalidade auxiliar o profissional médico a identificar , retrain e obstruir os vasos sanguíneos , tendões e nervos. É apresentado em cores de modo a codificar os vasos para uma rápida identificação. Os métodos sugeridos para identificação são: Vermelhos (Artérias) , Azul (Veias) , Amarelos (Ureteres) e Brancos (Nervos e Tendões).

Tabela Comparativa :

Código	Cor	Tamanho	mm (largura x comprimento)	Quantidade de loops por envelope	Quantidade de envelopes por caixa
011001PBX	Vermelho	Mini	0,83 x 406	2	10
011002PBX	Azul	Mini	0,83 x 406	2	10
011003PBX	Amarelo	Mini	0,83 x 406	2	10
011004PBX	Branco	Mini	0,83 x 406	2	10
011011PBX	Vermelho	Maxi	1,0 x 406	2	10
011012PBX	Azul	Maxi	1,0 x 406	2	10
011013PBX	Amarelo	Maxi	1,0 x 406	2	10
011014PBX	Branco	Maxi	1,0 x 406	2	10
011021PBX	Branco	Supermaxi	1.3 x 559	2	10
011022PBX	Azul	Supermaxi	1.3 x 559	2	10
011032PBX	Azul	Mini	0,41 x 406	2	10
011301PBX	Vermelho	Mini	0.83 x 762	2	10
011302PBX	Azul	Mini	0.83 x 762	2	10
011303PBX	Amarelo	Mini	0.83 x 762	2	10
011304PBX	Branco	Mini	0.83 x 762	2	10
011311PBX	Vermelho	Maxi	1.0 x 762	2	10
011312PBX	Azul	Maxi	1.0 x 762	2	10
011313PBX	Amarelo	Maxi	1.0 x 762	2	10
011314PBX	Branco	Maxi	1.0 x 762	2	10

	PROEXI COMERCIO, EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI .	Emissão: Abr/2021
	FICHA TÉCNICA	

Fotos:

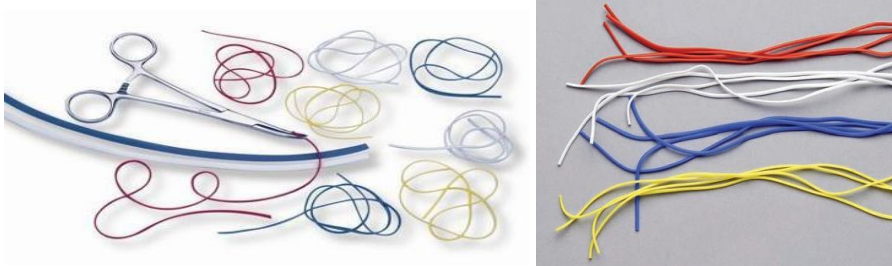

Embalagem Primária	Embalagem Secundária
	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div> <p>Sterion®</p> <hr style="border: 2px solid red;"/> <p>REF 011001PBX Silicone Vessel Loops, Red Mini LOT 123456 QTY 2 MFG 2019-07-01 EXP 2024-07-01</p> <p>  </p> <p> <small>Aspen Surgical Products Inc. 6945 Southbelt Dr. SE Caledonia, MI 49316 USA Phone 616-698-7100 Toll-Free 888-364-7004 www.aspensurgical.com</small> </p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>Aspen Surgical.</p>   <p> <small>(01)00897761006799 (11)190701 (17)240701 (10)123456</small> </p> <p> CE 2797 Rev 6 </p> </div> </div>

Instruções de Uso:

- 1- Retrair – Enrolar o Surgical Vessel Loop em volta do vaso , fixando-o com uma pinça no campo cirúrgico ou no lado de fora da ferida .
- 2- Ocluir – Enrolar o Surgical Vessel Loop duas vezes em volta o vaso , fixando-o no vaso para segurar.
- 3- Identificar – Enrolar o Surgical Vessel Loop em volta do vaso, nervo , ureter ou intestino.

Especificações Técnicas:


Componente: Silicone Grau Médico

Condições de Armazenamento:

Armazenar a temperatura ambiente , em local seco, arejado e ao abrigo de luz natural.

Advertências:

- 1 -Usado por equipe profissional médica
- 2 – O fabricante recomenda uso único

	PROEXI COMERCIO, EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI .	Emissão: Abr/2021
	FICHA TÉCNICA	

3 – O dispositivo destina-se a uma duração de contato limitada, inferior ou igual a 24 horas.

4 – O reuso do dispositivo pode levar a infecções / contaminações e /ou avarias do mesmo ,o que pode causar ferimento ao paciente .

Importador/Distribuidor: Proexi Comércio , Exportação e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Eireli.

Rua: Conde de Porto Alegre , 57 , Rocha , 1° andar Cep : 20960-110

Tel: (21) 3860-3136 – sac@promedicaexportacao.com.br

Responsável Técnico: Areta Marcela Oliveira do Vale Costa COREN – RJ nº 264.411

Fabricante Responsável: Aspen Surgical 6945 Southbelt Drive , SE, Caledonia, MI 49316 - EUA