	PROEXI COMERCIO, EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI .	Emissão: Abril/2022
	FICHA TÉCNICA	

Identificação do produto e Apresentação

Nome Comercial: **Caneta marcadora de pele**

Modelos: **2700**

Nº de registro na ANVISA: **Isto de Registro**

Fabricante recomenda o uso em um único paciente.

Prazo de validade: **05 anos**

Embalagem: **Apresentação por caixa, acondicionada 50 unidades.**

Produto Estéril em raio gama.

Não reprocessar.

Pronto Uso

Foto:



Indicação de Uso/Finalidade:


A caneta marcadora de pele tem uma tecnologia diferenciada que mesmo após a antissepsia ela não perde sua marcação, utilizada para realizar marcações na pele intacta do paciente antes do procedimento cirúrgico.

Destina-se a ser utilizada por profissionais de saúde em pacientes que necessitam de procedimentos cirúrgicos.

Instruções de Uso e/ou Modo de Uso:

- 1- Retire a tampa da caneta marcadora de pele para expor a ponta.
- 2- Marque as áreas pretendidas na pele com a caneta marcadora de pele, de acordo com o protocolo do estabelecimento.
- 3- Deixe as marcações secarem na pele durante, aproximadamente, 1 minuto antes de molhar ou manusear.
- 4- Aplique a solução de preparação, conforme instrução de uso do fabricante da solução.
- 5- Descarte a caneta juntamente com os dispositivos cirúrgicos gerais, de acordo com o protocolo da Instituição.

Composição da Tinta: Violeta de Genciana , fixador de alta resistência .

	PROEXI COMERCIO, EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI .	Emissão: Abril/2022
	FICHA TÉCNICA	

Especificações Técnica:

Modelo	Código	Tipo de ponta	Quantidade por caixa
WriteSite Plus	2700	Ponta Fina	50 unidades

Precauções:

- A tinta marcadora de pele deve ser aplicada na pele intacta e seca (antes de aplicar a solução de preparação da pele). A tinta não deve interagir com solução de preparação ou a pele molhada.
- A preparação da pele com solução à base de álcool isopropílico antes de efetuar a marcação pode aumentar a aderência da tinta à pele.

Importador/Distribuidor: Proexi Comércio, Exportação e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Eireli.

Rua: Conde de Porto Alegre, 57, Rocha, 1º, andar Cep : 20960-110

Tel: (21) 3860-3136 – sac@promedicaexportacao.com.br

Responsável Técnico: Areta Marcela Oliveira do Vale Costa COREN – RJ nº 264.411

Fabricante Responsável: Aspen Surgical, 6945 Southbelt Drive , SE, Caledonia, MI 49316 - EUA