

	PROEXI COMERCIO, EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI .	<b>Emissão:</b> <b>NOV/2020</b>
	<b>FICHA TÉCNICA</b>	

### Identificação do produto e Apresentação

Nome Comercial: **Máscara Laríngea de PVC Tappa**

Nº de registro na ANVISA: **81194869003**

Embalagem: **Unitária.**

Proibido reprocessar

Prazo de validade: **05 anos**

Produto estéril por Óxido de Etileno.

### Códigos do Fabricante:

Referência	Tamanhos
LMA 1004C1	1,0
LMA 1507C1	1,5
LMA 2010C1	2,0
LMA 2514C1	2,5
LMA 3020C1	3,0
LMA 4030C1	4,0
LMA 5040C1	5,0

### Fotos:



### Descrição e Indicação

Dispositivo médico indicado para estabelecer e manter o controle das vias aéreas do paciente, durante procedimento de rotina, anestesia ou inconsciência. Utilizando ventilação espontânea ou ventilação por pressão positiva. utilizado quando não for possível a intubação traqueal. Este dispositivo não permite aspiração gástrica.

### Instruções de Uso

- 1- Escolha o tamanho ideal para cada paciente
- 2- Remova o produto da embalagem e evite contaminar
- 3- Com uma seringa esvazie completamente o ar
- 4- Na ponta traseira da Máscara Laríngea, cubra com uma pequena quantidade de lubrificante solúvel em água, segurando a Máscara com uma mão estilo caneta.

	PROEXI COMERCIO, EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI .	<b>Emissão: NOV/2020</b>
	<b>FICHA TÉCNICA</b>	

- 5- Posicione a cabeça e o pescoço, como se fosse realizar a técnica de intubação traqueal. Empurrando-a para trás com uma mão, enquanto insere a máscara na boca com a outra mão.
- 6- Para evitar o deslocamento, mantenha o dedo indicador pressionando o palato.
- 7- Use a seringa para insuflar o cuff com ar suficiente, para obter a pressão baixa. Durante a inflação do cuff não segure o tubo, pois impedirá o dispositivo de se posicionar na sua localização correta.
- 8- Após o uso esvazie completamente o ar e retire a máscara laríngea.

### **Especificações Técnicas**

Composição: Cloreto de Polivinil (PVC), Policarbonato.

### **Condições de Armazenamento**

O produto deve ser armazenado em ambiente fresco, seco, bem ventilado e protegido da luz solar, com umidade relativa do ar inferior a 80%.

### **Advertências:**

- 1 – Este produto é feito para criar uma via aérea de curto prazo não determinada pelo paciente, não use para outros fins.
- 2 – Os usuários devem ser treinados por pessoal médico capacitado.
- 3 – Use imediatamente após desembalar.
- 4 – Usar dentro do prazo de validade.
- 5 – Quando o manguito não puder ser esvaziado após o uso, corte tubo imediatamente e retire o produto quando o manguito estiver vazio até um certo nível.

**Importador/Distribuidor:** Proexi Comércio, Exportação e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Eireli.

**Rua:** Conde de Porto Alegre, 57, Rocha, 1º andar Cep : 20960-110

**Tel:** (21) 3860-3136 – sac@promedicaexportacao.com.br

**Responsável Técnico:** Areta Marcela Oliveira do Vale Costa COREN – RJ nº 264.411

**Fabricante Responsável:** Hangzhou Tappa Medical Technology Co , Ltd

**Endereço:** No . 225#, Chutian Road , Binjiang District , Hangzhou , China , 310051.

**Tel – (+86) 571 8808 5616**