

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	REV.00
	FICHA TÉCNICA	

Identificação do Produto e Apresentação

Nome Técnico: Conectores e Conexões

Nome Comercial: Conector Microclave ICU

Código do Fabricante: 011-MC100

Nº de Registro na Anvisa: 81832589003

Reprocessamento Proibido.

Prazo de Validade: 05 anos

Embalagem: unitária.

Produto estéril - Esterilizado por irradiação e-Beam

Fotos:



Indicação de Uso/Finalidade:

Conector MicroClave é um dispositivo de uso único, estéril, não agulhado, destinado a realizar a transferência de soluções contidas em frascos e/ou bolsas (administração intravascular).


Instruções de Uso e/ou Modo de Uso:

1. Usando técnica asséptica, abra a embalagem na extremidade designada e remova o conector.
 2. Desinfete o conector MicroClave e conecte-o a um dispositivo de administração de fluídos, empurrando-o diretamente para dentro e girando-o, até conseguir uma conexão segura. Para conjuntos/dispositivos que possuam anel rotativo, assegure-se de que o conector luer esteja totalmente encaixado antes de apertar o anel.
 3. Purgue o conector MicroClave com solução salina normal ou de acordo com o protocolo da instituição.
 4. É desaconselhado a troca dos conectores após a infusão de conteúdos sanguíneos.
- OBS: Após uma utilização com sangue, os dispositivos devem ser irrigados/lavados de acordo com o protocolo da Instituição.

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	REV.00
	FICHA TÉCNICA	

Componentes e Composição:

Não contém látex e nem DEHP.

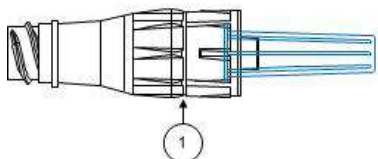

1)	Conector MicroClave	Polipropileno, Policarbonato e Silicone
----	---------------------	---

Armazenamento / Transporte:

- Conservar em temperatura ambiente (15° C a 30° C).
- Conservar em condições de umidade relativa de 40% a 90%.

Condições de Manipulação / Descarte:

Não há condições especiais de manipulação. Descartar de acordo com o protocolo do hospital.

Advertências:

Proibido Reprocessar.

Leia e siga cuidadosamente as instruções antes de utilizar.

Não utilizar agulhas, cânulas ou tampas de luer nos conectores MicroClave.

Manter a embalagem unitária intacta. Não utilizar se a embalagem estiver aberta ou danificada.

Seguir as instruções de uso. Não utilizar este produto para qualquer outro fim além do indicado.

Precauções:

Descartar após o uso.

O Dispositivo é compatível com luers com um diâmetro interior (ID) de entre 1,55 mm e 2,8 mm.

Não utilize se a embalagem estiver violada ou danificada.

Especificações Técnicas:

<u>Código</u>	<u>Capacidade</u>	<u>Comprimento</u>
011-MC100	0,04 mL	0,82 '' (2,08 cm)

Registrado por: CEDRS Gestão Empresarial.

Rua Silva Bueno nº 1660 conjunto 1001 – Ipiranga– São Paulo – SP – CEP: 04208-001.

CNPJ: 27.242.576/0001-11.

RT: Maria Angélica Rodrigues Pereira – COREN/SP: 039.294.

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	REV.00
	FICHA TÉCNICA	

Importador/Distribuidor: CNPH – Comercial Nacional de Produtos Hospitalares

Rua Gama Cerqueira, 331 e 337 - CEP: 01539-010 - Cambuci - São Paulo – SP

CNPJ: 00.142.576/0001-86

Tel: 011-3385-9339 – sac@cnph.com.br

Responsável Técnico: Débora Podmowski Adjamian – CRF-SP: 84.729.

Fabricante Responsável: ICU Medical, Inc.

951 Calle Amanecer San Clemente, CA 92673.