

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	REV.00
	<b>FICHA TÉCNICA</b>	

### **Identificação do Produto e Apresentação**

**Nome Técnico:** Extensão

**Nome Comercial:** Extensor 2 vias com Conector Microclave - ICU

**Modelos:** 011-MC2005-2-I (12Fr); 011-MC3316 (6 Fr- Pedi)

**Registro Anvisa:** 81832589008

Reprocessamento Proibido.

**Prazo de Validade:** 05 anos

**Embalagem unitária.**

**Produto estéril** - Esterilizado por irradiação e-Beam

**Foto:**



#### **Indicação de Uso/Finalidade:**


Dispositivo de uso único, estéril, não pirogênico destinado ao uso como um acessório para conjunto de administração intravascular, para a administração de fluidos a um paciente através de uma cânula colocada na veia ou artéria, isento de agulhas.

#### **Instruções de Uso e/ou Modo de Uso:**

1. Usando técnica asséptica, abra a embalagem na extremidade designada e remova o dispositivo. Aperte todas as conexões, quando for aplicável.
2. Feche o clamp (pinça), se aplicável.
3. Purgue o conector de acordo com o protocolo da instituição:
  - conectando-o ao conjunto de extensão ou à uma seringa contendo a solução de lavagem;ou
  - conectando-o ao conjunto de extensão ou à extremidade distal do conjunto de administração IV.
4. Quando aplicável, abra os clamps (pinças) e proceda à infusão da solução para remover o ar contido no sistema. Repita esta ação para extensões ou dispositivos múltiplos, se for necessário.
5. Para purgar/acessar o conector: Inverta-o e bata para remover o ar. Desinfete o conector e conecte o dispositivo de administração empurrando-o diretamente para dentro e girando-o até conseguir uma conexão segura. Para conjuntos contendo um anel rotativo, assegure-se de que o conector luer está totalmente encaixado antes de apertar o anel. Irrigue o conector com solução salina normal ou de acordo com o protocolo da instituição.

6. Depois de purgado, encaixe o conector ao dispositivo de acesso vascular pretendido. Em relação aos conjuntos/dispositivos com luers rotativos, certifique-se de que o luer está totalmente encaixado antes de fechar o anel.

**Componentes e Composição:**

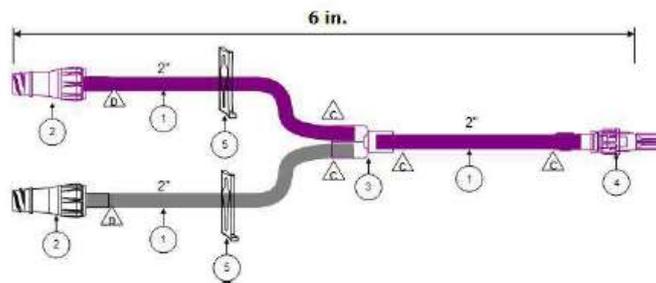

1)	Tubo	PVC (Policloreto de Vinila)
2)	Conector MicroClave	ABS (Acrlonitrila Butadieno Estireno), Silicone, Fluorosilicone e Policarbonato
3)	Conector	PVC
4)	Luer macho	PVC (Policloreto de Vinila), Policarbonato e Polietileno
5)	Clamper	Polietileno

**Especificações Técnicas:**

<u>Código</u>	<u>Tamanho</u>	<u>Capacidade</u>	<u>Clamp</u>	<u>Conector Micro Clave</u>
011-MC2005-2-I (12Fr)	15 cm	0,87 mL	02	02 MicroClave
011-MC3316 (6 Fr- Pedi)	15 cm	0,33 mL	03	02 MicroClave

**Armazenamento / Transporte:**

- Conservar em temperatura ambiente (15° C a 30° C).
- Conservar em condições de umidade relativa de 40% a 90%.

**Condições de Manipulação / Descarte:**

Não há condições especiais de manipulação. Descartar de acordo com o protocolo do hospital

**Advertências:**

Proibido Reprocessar.

Leia e siga cuidadosamente as instruções antes de utilizar.

Não utilizar agulhas, cânulas ou tampas de luer nos conectores MicroClave.

Manter a embalagem unitária intacta. Não utilizar se a embalagem estiver aberta ou danificada.



COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES

REV.00

## FICHA TÉCNICA

Seguir as instruções de uso. Não utilizar este produto para qualquer outro fim além do indicado.  
Não contém látex e nem DEHP.

**Precauções:** Descartar após o uso.

O Dispositivo é compatível com luers com um diâmetro interior (ID) de entre 1,55 mm e 2,8 mm.  
Não utilize se a embalagem estiver violada ou danificada.

**Registrado por:** CEDRS Gestão Empresarial.

Rua Silva Bueno nº 1660 conjunto 1001 – Ipiranga– São Paulo – SP – CEP: 04208-001.

CNPJ: 27.242.576/0001-11.

RT: Maria Angélica Rodrigues Pereira – COREN/SP: 039.294.

**Distribuidor:** CNPH – Comercial Nacional de Produtos Hospitalares

Rua Gama Cerqueira nº 331 e 337 – Cambuci – São Paulo – SP - CEP: 01539-010 -

CNPJ: 00.142.576/0001-86

Tel: 011-3385-9339 – sac@cnph.com.br

Responsável Técnico: Débora Podmowski Adjamian – CRF-SP: 84.729

**Fabricante Responsável:** ICU Medical, Inc.

951 Calle Amanecer San Clemente, CA 92673.