	PROEXI COMERCIO, EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI .	<b>Emissão:</b> <b>Abril/2022</b>
	<b>FICHA TÉCNICA</b>	

### Identificação do produto e Apresentação

Nome Comercial: **Caneta marcadora de pele**

Modelos: **2630 e 2730**

Nº de registro na ANVISA: **Isento de Registro**

Fabricante recomenda o uso em um único paciente.

Prazo de validade: **05 anos**

Embalagem: **Apresentação por caixa, acondicionada 50 unidades.**

Produto Estéril em raio gama.

Não reprocessar.

Pronto Uso

### Foto:



### Indicação de Uso/Finalidade:


A caneta marcadora de pele é utilizada para realizar marcações na pele intacta do paciente antes do procedimento cirúrgico.

Destina-se a ser utilizada por profissionais de saúde em pacientes que necessitam de procedimentos cirúrgicos.

### Instruções de Uso e/ou Modo de Uso:

- 1- Retire a tampa da caneta marcadora de pele para expor a ponta.
- 2- Marque as áreas pretendidas na pele com a caneta marcadora de pele, de acordo com o protocolo do estabelecimento.
- 3- Deixe as marcações secarem na pele durante, aproximadamente, 1 minuto antes de molhar ou manusear.
- 4- Aplique a solução de preparação, conforme instrução de uso do fabricante da solução.
- 5- Descarte a caneta juntamente com os dispositivos cirúrgicos gerais, de acordo com o protocolo da Instituição.

**Composição da Tinta:** Violeta de Genciana

	PROEXI COMERCIO, EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI .	<b>Emissão:</b> <b>Abril/2022</b>
	<b>FICHA TÉCNICA</b>	

**Especificações Técnica:**

Modelo	Código	Tipo de ponta	Quantidade por caixa
Richard-Allan	2630	Ponta Fina	50 unidades
Richard-Allan	2730	Ponta Regular	50 unidades

**Precauções:**

- A tinta marcadora de pele deve ser aplicada na pele intacta e seca (antes de aplicar a solução de preparação da pele). A tinta não deve interagir com solução de preparação ou a pele molhada.
- A preparação da pele com solução à base de álcool isopropílico antes de efetuar a marcação pode aumentar a aderência da tinta à pele.

**Importador/Distribuidor:** Proexi Comércio, Exportação e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Eireli.

**Rua:** Conde de Porto Alegre, 57, Rocha, 1º, andar Cep : 20960-110

**Tel:** (21) 3860-3136 – sac@promedicaexportacao.com.br

**Responsável Técnico:** Areta Marcela Oliveira do Vale Costa COREN – RJ nº 264.411

**Fabricante Responsável:** Aspen Surgical, 6945 Southbelt Drive , SE, Caledonia, MI 49316 - EUA