



Ficha Técnica

Identificação do produto e Apresentação

Nome Técnico: Máscara

Nome Comercial: Máscara Descartável para ventilação não invasiva

Modelos: 313-9051W; 313-9050W.

Nº do Cadastro na ANVISA: 10342600069



Prazo de Validade: 10 anos

Embalagem: Unitária.

Produto Não Estéril

Pronto uso

Código e Fotos

Código	Modelo da Máscara	Tamanho da máscara	Foto
313-9051W	Bitrac SE Shield Mask	Adulta	
313-9050W	Bitrac Shield Mask	Adulta	

Formas de Apresentação

Máscara embalada em embalagem primária em PVC. Embalagem secundária em papel tipo papelão (celulose + papel reciclado) contendo 10 unidades por caixa.

Os acessórios são embalados individualmente em embalagem primária de PVC e então em embalagem secundária de papelão.

Descrição e Indicação

A ventilação não invasiva (VNI) consiste na aplicação de um suporte ventilatório sem recorrer a métodos invasivos, evitando desta forma as complicações associadas à entubação orotraqueal e ventilação mecânica invasiva. Esta técnica já demonstrou ser eficaz em diversos tipos de insuficiência respiratória aguda ou crónica agudizada.



Ficha Técnica

A VNI pode ser utilizada em aparelhos específicos nos modos CPAP (pressão positiva contínua nas vias aéreas) e/ou BIPAP (uso de dois níveis de pressão, um nível inspiratório e outro expiratório).

As indicações para o uso de VNI podem ser: exacerbação do DPOC, exacerbação da ASMA, edema pulmonar cardiogênico, insuficiência respiratória hipoxêmica, pacientes em cuidados paliativos, pós extubação, apnéia do sono.

O modelo com Cotovelo Padrão (SE) cor azul, deve ser utilizado em ventilador mecânico invasivo com ramo duplo.

O modelo com Cotovelo cor transparente, possui uma válvula anti-asfixia e deve ser utilizado em Bipap/Cpap com ramo único.

Instrução de Uso

- Selecione o modelo e o tamanho da máscara (interface) de acordo com o tamanho da face do paciente.
- Encaixe o fixador cefálico na parte superior da máscara e coloque-a na face do paciente.
- Ajuste o fixador cefálico na cabeça do paciente e encaixe-o no clip na parte inferior da máscara.
- Faça os ajustes necessários conforme o modelo da máscara.

Composição

Máscara e cones: Policarbonato

Coxim da máscara, tiras e protetor do fixador cefálico: Silicone

Omnclip: Policarbonato e Silicone.

Fixadores cefálicos: Poliéster.

Clip do fixador cefálico: Acetal

Circuito: Polietileno

Livre de Látex.

Importador/Distribuidor: CNPH – Comercial Nacional de Produtos Hospitalares

Rua Gama Cerqueira, 331 - CEP: 01539-010

Cambuci - São Paulo – SP

Tel: 011-3385-9339 – sac@cnph.com.br

Responsável Técnico: Morgana Borges de Araújo. CRF-SP: 74338

Fabricante Responsável: Pulmodyne, Inc; 2055 Executive Drive, Indianapolis, IN 46241