

	PROEXI COMERCIO, EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI .	<b>Emissão:</b> <b>MAI/2023</b>
	<b>FICHA TÉCNICA</b>	

### Identificação do produto e Apresentação

Nome Comercial: **Circuito Descartável Promédica**

Nº de registro na ANVISA: **81194869012**

Embalagem: **Unitária.**

Proibido reprocessar

Prazo de validade: **03 anos**

### Descrição e Indicação:

O circuito expansível Promedica é usado em cirurgias durante o ato anestésico, transoperatório ou quando houver necessidade de ventilação mecânica. Levando oxigênio e gases anestésicos para o paciente.

### Códigos do Fabricante:

Código do Fabricante	Composição
MGC-1.8SS	1.8m circuito expansível Adulto 1.8m tubo corrugado (ID 22mm) 2L balão de reinalação látex free Conector "Y" Conector reto
MGC-3.0SS	3m circuito expansível Adulto 3m tubo corrugado (ID 22mm), 2L balão de reinalação látex free Conector "Y" Conector reto
MGE-1.8SS	1.8m circuito expansível Pediátrico 1.8m tubo corrugado (ID 15 mm) 1L balão de reinalação látex free Conector "Y" Conector reto
MGE-3.0SS	3m circuito expansível Pediátrico 3m tubo corrugado (ID 15 mm) 1L balão de reinalação látex free Conector "Y" Conector reto

	PROEXI COMERCIO, EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI .	Emissão: MAI/2023
	FICHA TÉCNICA	

**Fotos:**

**Circuito Expansível com conector “Y”**



**Balão de reinalação látex free**



**Tubo corrugado**



**Conector reto**



**Apresentação comercial do produto:**

O produto é composto por 1 circuito, 1 conector “Y”, 1 tubo corrugado, 1 conector reto e 1 balão de reinalação látex free.

O Circuito Expansível Descartável Promedica é acondicionado individualmente em embalagem de Polietileno.

**Instruções de uso:**

- 1- Abra a embalagem na borda da mesma. Não use tesouras ou objetos pontiagudos para abrir a embalagem.
- 2- Antes de conectar o produto ao paciente, se assegure de que os conectores estejam bem ajustados para que não ocorra vazamento de ar.
- 3- Siga o manual do equipamento para testar o produto, certifique-se que o produto é compatível com o equipamento usado e confirme que o produto não possui vazamento ou oclusões.
- 4- Pacientes devem ser monitorados constantemente quando o produto estiver em uso.

	<b>PROEXI COMERCIO, EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI .</b>	<b>Emissão: MAI/2023</b>
	<b>FICHA TÉCNICA</b>	

**Composição do Produto:**

Item		Material
Circuito	Conector cotovelo	Polipropileno
	Tampa do conector cotovelo	TPE (elastômetro termoplástico)
	Conector "Y"	Polipropileno
	Tubo corrugado	Polipropileno +EVA
	Conector final	Polipropileno
Balão de reinalação		Nitrilo Butadieno
Conector reto		Polipropileno

**Condições de armazenamento:**

Os produtos devem ser armazenados em ambiente fresco, seco, bem ventilado e limpo. Não armazenar em ambientes com temperatura superior a 80%.

**Condições para o Transporte:**

Os produtos devem ser transportar em ambiente fresco, seco, bem ventilado e limpo.

**Precauções:**

- 1- Checar se os produtos estão dentro da validade antes do uso.
- 2- Não utilizar o produto se e a embalagem estiver danificada.
- 3- Checar se todos os conectores estão seguros após aberta a embalagem.
- 4- Checar os conectores e circuito com conexão com o equipamento de anestesia ou equipamento de respiração para assegurar que não há vazamentos.
- 5- O fabricante recomenda o uso único.

**Importador/Distribuidor:** Proexi Comércio, Exportação e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Eireli.

**Rua:** Conde de Porto Alegre, 57, Rocha, 1° andar Cep : 20960-110

**Tel:** (21) 3860-3136 – sac@promedicaexportacao.com.br

**Responsável Técnico:** Areta Marcela Oliveira do Vale Costa COREN – RJ nº 264.411

**Fabricante Responsável:** Zhejiang Haisheng Medical Device Co., Ltd.

NO.8, Zhenyuan Road, Yuecheng District, 312071 Shaoxing City, Zhejiang

Province, People's Republic of China