	CIRÚRGICA COPACABANA 2000 EIRELI .	Emissão: 30OUT2024
	FICHA TÉCNICA	

Identificação do Produto e Apresentação

Nome Técnico: **Fixador para cânula**

Nome Comercial: **Fixador de Multi Dispositivos – Medfix® Estabilize**

N° de registro na ANVISA: 80327110015

Embalagem: **Unitária.**



Proibido reprocessar

Prazo de validade: **2 anos**

Códigos do fabricante:

Descrição	Código
MEDFIX® ESTABILIZE	Ref. 106.010

Fotos

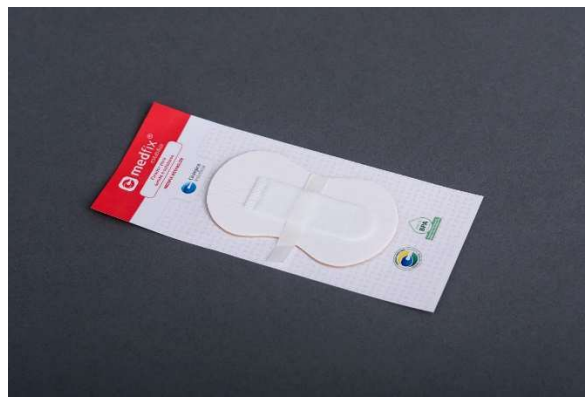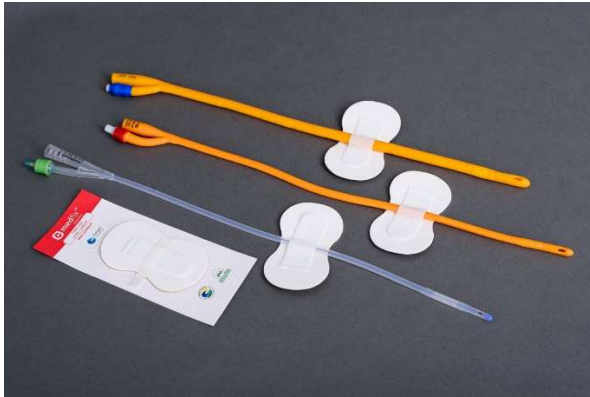


Descrição e Indicação

O Fixador de Multi Dispositivos – MedFix® Estabilize é um dispositivo para fixação de cânulas, cateteres, tubos, sondas, acessos e outros dispositivos na pele do paciente.

Uma parte do produto tem contato direto com a pele do paciente promovendo a fixação adesiva do produto, outra parte se alonga em torno do dispositivo a ser estabilizado promovendo uma fixação mecânica do mesmo, evitando a movimentação e soltura do dispositivo.

MEDFIX® ESTABILIZE garante a adequada fixação de sondas e cateteres na pele do paciente. Uma parte do produto tem contato direto com a pele do paciente promovendo a fixação adesiva, outra parte de velcro, se alonga em torno do dispositivo a ser estabilizado promovendo a fixação mecânica do mesmo, evitando a movimentação e soltura do dispositivo.

	CIRÚRGICA COPACABANA 2000 EIRELI .	Emissão: 30OUT2024
	FICHA TÉCNICA	

Instruções de Uso

- 1) Realizar a limpeza da região para higienizar e retirar oleosidade da pele no local em que será aplicado o fixador;
- 2) Abrir a embalagem plástica e retirar o FIXADOR DE MULTI DISPOSITIVOS – MEDFIX® ESTABILIZE;
- 3) Retirar o liner de proteção da espuma adesiva e colar no paciente no local desejado;
- 4) Retirar o liner de proteção do adesivo abaixo;
- 5) Abrir a aba superior em velcro e posicionar o dispositivo a ser fixado sobre ela;
- 6) Contornar o dispositivo com as aletas colando as extremidades das aletas sobre o dispositivo;
- 7) Trocar a cada 24 horas ou quando apresentar contaminação;
- 8) Descartar o produto após o uso;
- 9) Não reutilizar o produto em hipótese alguma.

Especificações Técnicas:

O Fixador de Multi Dispositivos tem como princípio de funcionamento e seu mecanismo de ação de garantir a adequada fixação de cânulas, cateteres, tubos, sondas, e outros dispositivos na pele do paciente. Uma parte do produto tem contato direto com a pele do paciente promovendo a fixação adesiva do produto, outra parte se alonga em torno do dispositivo a ser estabilizado promovendo uma fixação mecânica do mesmo, evitando a movimentação e soltura do dispositivo.

Componentes e Composição:

Constituído de uma fita adesiva de dupla face, inferiormente revestida de uma camada de liner siliconado e superiormente de uma camada de TNT, esta sobreposta por uma camada de velcro loop, ladeada por um adesivo para fixação de dispositivos, por sua vez sobreposto por sua respectiva camada de liner siliconado, sendo todos sobrepostos por uma camada de velcro look.

Condições para transporte


Os produtos devem ser transportados em ambiente fresco, seco, bem ventilado e limpo

Condições de Armazenamento

Os produtos devem ser armazenados em ambiente fresco, seco, bem ventilado e limpo.

Advertência

- Verificar se o produto ficou bem fixado e confortável.
- O ajuste deve ser feito de modo a não causar lesões à pele.
- As trocas são indicadas a cada 24 horas após o início do uso, de acordo com protocolos de procedimentos de enfermagem, quando estão sendo usados adesivos em contato direto com a pele do paciente, ou quando apresentar contaminação.
- Não utilizar produtos que apresentem embalagens danificadas e/ou com prazo de validade expirado.

	CIRÚRGICA COPACABANA 2000 EIRELI .	Emissão: 30OUT2024
	FICHA TÉCNICA	

Precauções

- Visando assegurar e garantir a qualidade e eficácia do Fixador de Multi Dispositivos – MedFix® Estabilize deve ser observado todos os cuidados referentes ao seu armazenamento e manuseio correto.
- O Fixador de Multi Dispositivos, não deve ser usado próximo a fontes de calor e não devem manter contatos com solventes orgânicos.
- Informações ao meio ambiente: descartar após o uso, destinar conforme os procedimentos e/ou gerenciamento de resíduos de produtos para saúde.
- O produto não apresenta riscos desde que observada a sua correta utilização de acordo com a técnica e padrões dos centros de saúde e hospitalares e a sua finalidade.

Fabricante: Cirúrgica Copacabana 2000 Eireli.

Reg. MS/ANVISA: 8032711001

Rua Conde de Porto Alegre, 57, Rocha – Rio de Janeiro/ RJ

CEP: 20960-110

TEL/FAX: (21) 2548-5668 / 2548-5523

SAC.: sac@cirurgicaindustrial.com.br

CNPJ/MF: 02.340.772/0001-06

Responsável Técnico: Paula de Oliveira Arruda. COREN – RJ nº 44.9094-ENF